

nosiboo<sup>\*</sup>eco<sup>®</sup>  
manual nasal aspirator

## ユーザーマニュアル

Nosiboo ECO マニュアル鼻水吸引器



E-Mail: [customerservice@nosiboo.com](mailto:customerservice@nosiboo.com)

Web: [www.nosiboo.com](http://www.nosiboo.com)


Tel: +36 72 551 642



製造元: **ATTRACT KFT.**

住所: H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Hungary (ハンガリー)  
Made in EU



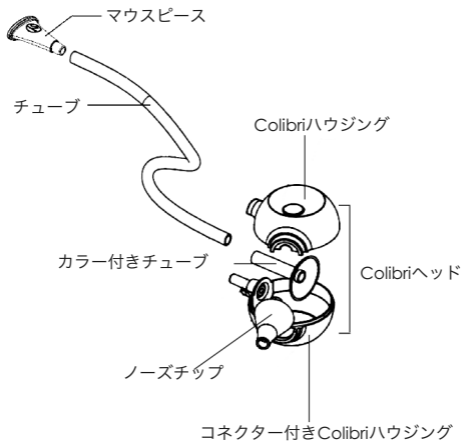

## 安全規定

次のような危険は回避してください。ユーザーの怪我や致命的な事故につながる可能性があります。

**警告** - このデバイスは、子供の鼻から粘液を取り除くためだけのものです。ご使用後は必ず毎回Colibriヘッドを消毒してください。分解したNosiboo ECOの部品をお子様の手が届く場所に放置しないでください。飲み込む危険があります。

このデバイスは、大人の方だけが使用できます。子供や身体的または精神的に制限のある方の近くにデバイスを放置しないでください。デバイスを使用する前に、すべての部品が適切に取り付けられていることを確認してください。デバイスを使用した後に発疹や発赤がお子様の鼻に現れた場合、デバイスの使用を中止してください！医師にご相談ください！次のような場合はこのデバイスを使用しないでください。血友病で、鼻中隔の粘膜の血管が広がっている、頻繁な鼻出血で、血液希釈剤を服用中、先天性奇形（例、口蓋裂など）。

## 1. 使用目的

小児期の風邪によって引き起こされる合併症の予防と鼻粘液除去による治癒の促進。自分で鼻をかんで鼻粘液を取り除くことができない子供（通常4歳未満）に推奨されます。吸引に必要な真空は、ユーザーの口によって作り出されます（間接的に分離されたデザインによる）。

吸引時、幼児は寝かせた状態にしてください。小児はじっと座っているようにしてください。マウスピースはあなたの口の中に入れて、消毒済みのノーズチップを鼻腔の中に入れ、少し眼の外側に向かうようにします。この姿勢で、口を使い断続的にチューブから吸引しつつ、ノーズチップをわずかに動かすことができます。チューブの接続箇所は、使用中下に向けてください。乾燥した、または非常に濃い鼻粘液は食塩水で溶けます。食塩水は、一度に5ml以上は使用しないでください。食塩水を使用した後は数分待ってから、鼻水吸引器を使用してください。Nosiboo ECOは、薄い液体を5mlまで保持できます。吸引された液体はノズルの内壁に溜まりますが、精巧なデザインのおかげで液体がColibriヘッドの内側から漏れることはありません。ですから、フィルターなしで安全に使用できます。

## 2. デバイスの説明と使用方法

1. Colibriヘッド部品を清掃する（清掃と保管の章を参照）
2. カラー付きチューブをColibriハウジングのコネクション側に接続する
3. Colibriハウジングのコネクションがない側を正しい位置に固定する
4. 次にフレキシブルノーズチップを対応する丸穴に押し込んで取り付ける
5. チューブの端をColibriのヘッドコネクションに取り付ける
6. チューブの反対側をマウスピースに取り付ける

このデバイスは1日に数回使用できます。このデバイスの目的は、お子様の穏やかな呼吸を促進することです。推奨使用頻度：必要に応じて1日に数回、起きた後、食事前、眠る前。

**3. 清掃と保管** – Colibriヘッドは、チューブとノーズチップを取り外した後、分解できます。マウスピースを清掃するには、それをチューブから取り外します。それから、ぬるま湯で部品を洗い、消毒液で消毒して乾かします。推奨される消毒剤：キッコ消毒剤。デバイスは、直射日光や輻射熱ヒーターから離れた密閉空間に保管してください。

**4. 環境** – Nosiboo ECOマニュアル式鼻水吸引器には、環境リスクがまったくありません。ですから、家庭ごみとして処分できます。

## 5. 仕様

重さ（包装を含む）： 105 g

寸法（一個の W x H x D）： 200 x 200 x 50 mm

使用期間の目安： 3か月