

電動鼻水吸引器 ノジブープロ

nosiboo^{*} pro[®]
electric nasal aspirator

JP

取扱説明書



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2016



reddot award 2014
winner

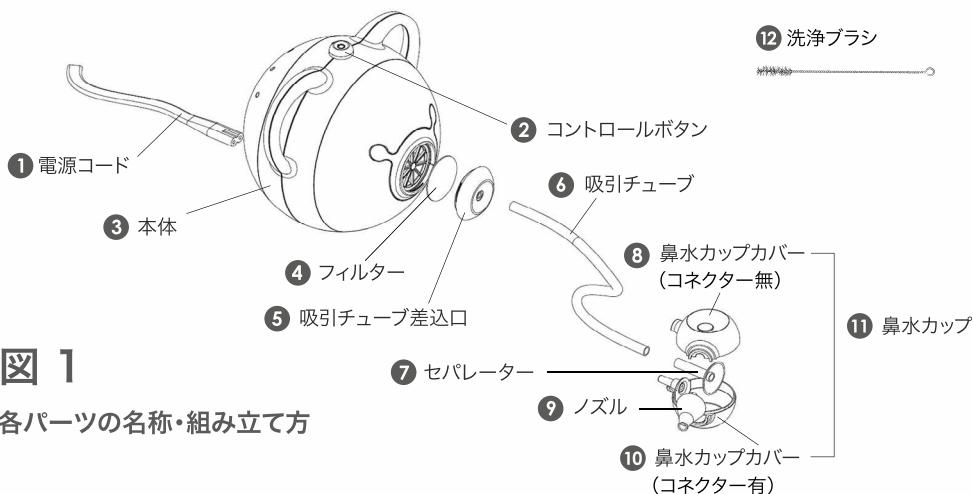


図 1

各パーツの名称・組み立て方

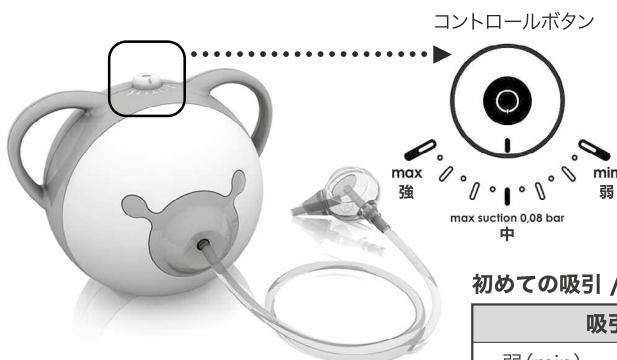


図 2

吸引圧の調整

吸引圧を調整してください。

初めての吸引 / 初期設定の目安

吸引圧	年齢	鼻水の状態
弱(min)～	新生児	サラサラ鼻水
中(minとmaxの中間)～	乳幼児	
強(max)	幼児・小児	ネバネバ鼻水

図 3

鼻水の吸引の仕方

ノズルを鼻の穴に挿入します。
鼻水カップをゆっくり動かして
鼻水のある場所を探すようにして
吸引してください。



下

1回あたり、片方の鼻に10秒以内で吸引してください。
数回に分けて吸引します。

* 長時間使用すると、本体裏側（排気側）が高温になる場合がございます。

【重要】
吸引チューブ接続側を
下に向けて吸引してください。

3. 鼻水カップカバーをはずします。

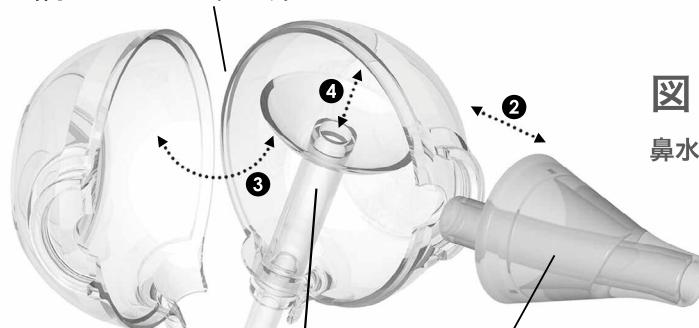


図 4

鼻水カップの分解

2. ノズルをはずします。

【重要】

必ずセパレーターを鼻水カップに装着して使用してください。
セパレーターがない場合、故障の原因となります。

取扱説明書

もくじ

製品の構成	3
お使いになる前に	3
安全上のご注意	3
重要な安全上に関する注意事項	4
1. 使用目的	5
2. 製品の紹介	6
3. 初めて操作	6
4. 使用方法	6
5. 故障かなと思ったら	8
6. メンテナンスと保管	11
7. 洗浄・消毒について	11
8. 電磁干渉に関する重要な情報	12
9. 環境	12
10. 製品仕様	12
11. アクセサリー・スペアパーツ	12

電動鼻水吸引器
Nosiboo Pro は、
管理医療機器です。

適用法：指令2011/83 / EU §16 (e) オーストリア共和国の欧洲議会および欧洲委員会：AGG : §18 (1) 5、ハンガリー：45/2014。 (II. 26.)
政府令 §29 (1) (e) . 日本：医薬品医療機器等法

製品の構成

- * 本体 * 吸引チューブ * 鼻水カップ+ノズル * ノズル(スペア) * フィルター * 電源コード * 洗浄ブラシ
- * 取扱説明書 * クイックマニュアル * 添付文書

お使いになる前に

ごあいさつ

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書は、品質保証書を兼ねています。大切に保管してください。
安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また、本書を大切に保管してください。



ご使用前に本書をよくお読みください。

安全上のご注意

誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

説明



* BF装着部（感電に対する保護の程度を表します。）



* クラスII機器（二重絶縁や補強絶縁による追加保護手段を備えた機器です。）



* 製造所と所在地



* 取扱説明書をご確認ください。

REF

* 参照（注文番号）



* 警告！

SN

* 製造番号



* 本体を水に濡らさないでください。

IP21

* 本体は、12.5mmより大きい固体物に対する保護、及び滴下する水に対する保護



* 有害廃棄物

重要な安全に関する注意事項



警告：誤った取扱いをすると、死亡、または重傷を負う可能性がある内容を示します。

一般的な使用に関する安全上の注意

本品は、必ず医師または医療従事者の指導のもとご使用ください。

- * 本品は、鼻腔内の粘液を除去するためのものです。他の目的には使用しないでください。
- * パスルームやその他の温氣の多い環境で本品を使用しないでください。
- * 液体または固体が本体の中に侵入した場合、直ちに本品の使用を中止してください。
お買い上げいただいた販売店または製造販売元にお問合せください。
- * 本品は、必ず大人の方が操作を行ってください。
- * 安定した平らな場所に本体を置いてご使用ください。
- * 長時間使用すると、本体裏側（排気側）が高温になる場合がございます。本品は、乳幼児から離して手の届かない位置でご使用及び保管してください。動作中は常にお子さまに対して本体を正面（吸引チューブ差入口側）に向けてご使用ください。
- * 使用中にノズルを鼻腔に入れたままお子さまを仰向けに寝かせたり、反対側の鼻の穴を塞いで吸引しないでください。
- * 本品を乳幼児の手の届くところに、置かないでください。
- * 大きなベット（犬や猫など）の近くに本品を置かないでください。
- * 電源コードと吸引チューブをお子さまの前に巻き付かないよう注意してください。
- * 本品は、手術室など酸素濃度が高い環境ではご使用できません。
- * 安全のために、本品は15分後に自動的にオフになります。自動電源オフ後、再度電源スイッチを押せば、本体の電源を起動させることができます。但し、長時間使用した後に本体が高温状態となっている場合、冷却時間として約50分の間、起動することはできませんのでご了承ください。
詳細については、本書の第4項をお読みください。
- * 本品をご使用する前に、すべての部品が適切に取り付けられていることを確認してください。
- * ご使用前に、セパレーターを鼻水カップに挿入していることを再度ご確認ください。
- * 本体にフィルターを必ず装着してご使用ください。
- * 5ml以上での水や生理食塩水を吸引しないでください。液体が吸引チューブに入り本体に侵入した場合、故障する可能性があります。
- * 鼻水カップの吸引チューブ接続部を下向きにしてご使用ください。
- * 粘液または液体がチューブに侵入した場合は本品の使用を中止してください。
その場合、本体のコンセントを抜き、鼻水カップと吸引チューブをきれいに洗浄にして乾燥させてください。
フィルターを確認し、濡れているまたは、詰まっている場合は直ちに交換してください。

- * 本体、吸引チューブ、鼻水カップが損傷したり割れたりしていないことを確認してください。破損していることがわかった場合は、直ちに使用を中止し、損傷した部品を交換してください。部品の詳細は、本書内にある「11. アクセサリー、スペアパーツ」のセクションをご参照ください。
- * 本品のご使用後にお子さまの鼻に発疹または赤みが現れた場合は、直ちに使用を中止し、かかりつけの医師にご相談ください。
- * Nosiboo Pro専用の吸引チューブと鼻水カップのみをご使用ください。

電源に関する安全上の注意

- * 電源コードを破損するようなことはしないでください。破損したコードは火災・感電・故障の原因となる可能性があるため、キズ付けたり、加工したり、無理にねじったり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを載せたりしないでください。
- * 電源コードは、絶縁体に損傷を与える可能性があるため、熱器具（暖炉、ヒーター、コンロなど）に近づけないでください。
- * 吸引チューブと鼻水カップを必ず乾燥させてからご使用ください。
- * 本体の取付けネジを取り外さないでください。他の目的のために本体を改造しないでください。
- * 誤使用により本体または電源コードに破損または亀裂がある場合、直ちに使用を中止してください。
- * 予期しない障害や誤動作が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。

本体の使用に関する安全上の注意

- * 使用後は常に鼻水カップを洗浄してください。
- * 取り外した鼻水カップは、乳幼児の手の届くところに放置しないでください。

一般的な注意事項

- * 本書内にある「電磁干渉の低減に関する重要な情報」のセクションの指示をよく読み、必ずご確認ください。
- * 本体または本体の部品を廃棄する場合は、本書内にある「環境」のセクションの指示を読み、ご確認ください。

1. 使用目的

電動鼻吸引器 Nosiboo Pro は、鼻腔内の分泌物、粘液（鼻水）の吸引に使用する吸引器です。

Nosiboo Pro は、使用目的に必要な吸引圧と排気流量で特別に設計されています。

鼻水カップは、粘液が本体に侵入するのを防ぐ特許取得済みの設計構造です。

適用対象（患者）：

- * 主に鼻をかむことによって鼻粘液を取り除くことができない、通常6歳未満の新生児、乳幼児、幼児、小児が対象です。
- * 鼻水で鼻が詰まっている状態

禁忌・禁止：

- * 血友病がある場合
- * 鼻の粘膜が腫れている、傷や炎症、出血などが見られる場合
- * 抗凝固薬（血液をサラサラにする薬）を服用中の場合
- * 先天性奇形の場合（口蓋裂や生まれつき鼻腔閉鎖、または鼻腔が狭くなっている場合）

推奨される使用者：

- * 知識：年齢に応じた一般的な知識を要する大人の方
- * 教育：本体を使用するための特別な研修や知識は必要ありません。
- * 重要：パッケージに含まれている取扱説明書を必ずご確認ください。
- * 必ず医師または医療従事者の指導のもとご使用ください。

2. 製品の紹介

参照：図1 - 各パートの名称・組み立て方

3. 初めての操作

鼻水カップの組み立て方

1. 鼻水カップの部品を洗浄し、十分に乾燥させてから組み立ててください。
(本書内にある「洗浄」および「メンテナンスと保管」のセクションをご参照ください)。
2. 鼻水カップカバー（コネクター付）にセパレーターを装着します。
3. 反対側の鼻水カップカバー（コネクター無）を正しい位置に装着します。
4. ノズルを鼻水カップに装着します。
5. 吸引チューブを鼻水カップの接続部（コネクター部）に装着します。

本体の組み立て方

6. 吸引チューブ差込口裏側のフィルターが所定の位置にあることを確認します。
7. 吸引チューブを本体の差込口に装着します。
8. 電源コードを本体の背面下部の電源プラグに接続したあと、コンセントに接続します。

本体を使用する準備が完了です。

4. 使用方法

ご使用の前に、電源コードのプラグがコンセントから簡単に引き出せる位置に本体を置いてください。コントロールボタンを押すと、本体の電源がオンとなり吸引が作動します。もう一度押すとオフとなり吸引が停止します。（本体が完全に作動するにはコントロールボタンを押してから2~3秒かかります）。図2のように、コントロールボタンのダイヤルを回しながら指先でお子さまに合った吸引力を確かめながら調整します。

参照：図2 - 吸引圧の調整

吸引圧の最小値（min）は新生児、最小値（min）と最大値(max)の中間は、乳幼児、最大値（max）は幼児・小児に適しています。
適正な吸引圧は、お子さまの鼻水の状態、鼻詰まりの程度、および体系によって変わります。サラサラな鼻水が場合は、低い吸引圧の設定でご使用ください。ネバネバした鼻水の場合は、通常よりも高い吸引圧の設定でご使用ください。

本製品は、大人の方のみが操作できます。お子さまには、絶対に操作させないでください。

吸引中は、お子さまが動いてしまわないようにしっかりと押さえてください。

吸引中の体の支え方

抱っこの姿勢：お子さまを膝の上に座らせ、お子様の片手を大人の方の脇で押さえ、お子さまのもう片方の手をやさしく押さえてく吸引してください。

ねんねの姿勢：お子さまの頭が足と足の間にくるように寝かせ、お子さまの両手を大人の方の足の下に入れてください。
お子さまの頭が動かないように両足でかるく押さえてください。頭を固定しながら吸引してください。

* お子様用の椅子に座わらせて吸引する場合は、大人2人でお子さまの頭と両手を押さえて吸引してください。

- **警告！長時間使用した場合、本体の排気口から熱風が出ることがあります。**
- 吸引中にお子さまを仰向けにしたり、もう片方の鼻の穴を塞がないでください。
- 本体の背面の排気口を塞がないでください。
- 本体が完全にオフになり、冷却フェーズ（電源ボタンを押して2~3秒）が終了したら、
本体から電源プラグを抜いてください。



鼻水カップは、使用毎に必ず洗浄し、完全に乾燥させてください。乾燥させたノズルをお子さまの鼻に挿入し、コントロールボタンを押して本体の電源を入れます。（本体は、前回使用された設定で動作します）。

参照：図3-鼻水の吸引の仕方

ノズルを鼻に挿入します。鼻水カップをゆっくり動かして鼻水のある場所を探すようにして吸引してください。

この方法を使用すると、鼻腔内の上顎洞につながる開口部に到達でき、鼻甲介の粘膜や鼻中隔の毛細血管を傷つけにくくなります。

稀に新生児の鼻孔が小さすぎてノズル先端を鼻孔内に挿入できないことがあります。この場合は、ノズル先端を鼻孔が覆われるよう密着させて吸引することで鼻腔内を適切に清掃することができます。

使用中は、鼻水カップと吸引チューブの接続部を下向きにして吸引してください。

特許取得済みの鼻水カップは、最大5 mlの液体を収容でき、鼻水が吸引チューブへの侵入を防ぎます。

乾燥しているまたは、非常に粘度の高い鼻水は、生理食塩水で鼻洗浄することやわらかくなり、吸引しやすくなります。しかし、液体が吸引チューブに入った場合、本体に損傷を与える可能性があるため、一度に5ml以上吸引しないでください。

鼻洗浄をした後は、数分待ち、乾燥した鼻水がやわらかくなつてから吸引してください。

医師などに処方された点鼻薬やその他の医薬品は、必ず吸引後にご使用ください。

1回あたり、片方の鼻に10秒以内で吸引してください。数回に分けて吸引します。

吸引を中断する場合は、本体のコントロールボタンを押して電源を切れます。モーターが完全に停止した後（電源をオフにして約5秒後）、再起動できます。本体は15分間連続して使用すると自動的に停止しますが、再起動できます。

長時間使用した場合、本体が熱くなるため一定の温度を超えると自動安全装置が働き、一時的にご使用できなくなります。

安全上の冷却時間として約50分間ご使用できませんので、ご了承ください。

約50分後に再度ご使用いただけます。

※使用環境により50分以上かかる場合もありますが、故障ではありません。

電動鼻吸引器 Nosiboo Proは1日に数回使用できます。鼻の気道を確保し、お子さまの呼吸を安定させることで快適に睡眠することができます。

ご使用後は、毎回本体の電源をお切りください。

電源を切った後、モーターは、冷却の為に数秒間作動していますが問題ございません。

完全にシャットダウンするまで、本体から電源プラグを抜かないでください。

使用中は、本体の背面にある排気口を塞がないでください。

吸引圧の目安：


* コントロールボタンのダイヤルを回すことで、弱 (min) - 中 - 強 (max)の吸引圧を調整することができます。

初めての吸引 / 初期設定の目安

吸引圧	年齢	鼻水の状態
弱 (min) ~	新生児	サラサラ鼻水
中 (minとmaxの中間) ~	乳幼児	
強 (max)	幼児・小児	ネバネバ鼻水

* 上記はあくまでも目安です。

* 適正な吸引力は、お子さまの鼻水の状態、鼻詰まりの程度、および体系によって変わります。サラサラな鼻水が場合は、低い吸引圧の設定でご使用ください。新生児・乳幼児でもネバネバした鼻水の場合は、通常よりも高い吸引力の設定でも安全に吸引していただけます。

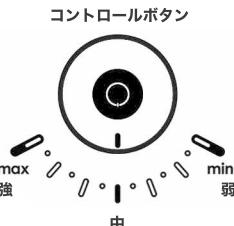

5. 故障かなと思ったら

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に次ページ以降のトラブルシューティングガイドをお読みください。主な問題の対処方法を記載しています。次のトラブルシューティングガイドでは、問題とその対処方法を確認することができます。これらの対処方法でも問題が解決しない場合、9ページにある故障管理ガイドをご確認ください。

トラブルシューティングガイド

現象	原因	対処方法
吸引できない。（本体が作動しない。）	電源プラグが正しく接続されていない。	電源コードを本体に接続してから、プラグをコンセントに接続してください。
吸引できない。（本体が作動しない。）	過度に使用した為、安全上の理由により本体が自動電源オフの状態になっている。	お子さまの健康上、これ以上の吸引はしばらくお控えください。本体は、約50分後に再度ご使用できます。
本体は作動するが、吸引力が弱い	鼻水カップが詰まっている、または、正しく組付け、装着されていない。	鼻水カップ・ノズルを分解してきれいに洗浄してください。完全に乾燥後、取扱説明書をよく読み正しく組み立ててください。
本体は作動するが、吸引力が弱い	フィルターが古くなっている。	取扱説明書内の「メンテナンスと保管」セクションを確認後、フィルターを交換してください。
液体または粘液が吸引チューブに侵入した。	鼻水カップが正しい向きで使用されていない。吸引チューブの接続部を下向きで使用されていない。	本体の電源を切り、ノズルと鼻水カップと吸引チューブをきれいに洗浄して乾燥させてください。フィルターを確認し、必要に応じて交換してください。
液体または粘液が吸引チューブに侵入した。	5ml以上の水、生理食塩水を吸引した	鼻洗浄に使用する生理食塩水の量を5ml未満に減らしてください。 本体の電源を切り、ノズル、鼻水カップ、吸引チューブを乾燥させてください。 フィルターを確認し、必要に応じて交換してください。

トラブルシューティングガイドの手順を実行しても本体が正常に機能しない場合は、故障管理ガイドをご確認ください。

故障管理ガイド

有効保証期間は、『お買い上げ後1年』です。取扱い説明書、本体銘板などの注意にそった正常な使用のもとで、保証期間内に万一故障した場合は、無償対応いたします。保証期間内に故障して無償対応を依頼される場合は、お客様のご氏名、ご住所、電話番号をご記名のうえ、レシートなどのご購入記録を添えてご購入いただきました販売店または、製造販売元にお問合せください。

製品保証について

外観上の問題	詳細説明	保障範囲
本体の底面にあるラベルシールの破れや異常はありますか。	本体裏側のラベルシールの損傷があった場合は、本体のハウジングが開いている可能性があります。	ご使用上で取扱いの過誤により発生した故障は、保証対象となりません。
本体の損傷、凹み、歪み、固定ネジの損傷、その周辺の被損または、その他の異常はありませんか。	本体ハウジングの損傷があった場合は、本体ハウジングが開いている可能性があります。	ご使用上で取扱いの過誤により発生した故障は、保証対象となりません。
フィルターまたは、その周囲は汚れていますか。フィルター裏側の開口部の損傷、異物が本体内部に侵入した痕跡はありませんか。	フィルターの汚れがあった場合は、本体内部に異物が侵入した可能性があります。	ご使用上で取扱いの過誤により発生した故障は、保証対象となりません。
吸引チューブ内の詰まり、汚れはありませんか。	吸引チューブ内に詰まり、汚れがある場合は、異物が本体内に侵入している可能性があります。	ご使用上で取扱いの過誤により発生した故障は、保証対象となりません。
使用上の問題		
本体を操作する前に、本体側の電源プラグが正しく接続されていますか。	外部からの要因により、本体の鼻水カップとの接続部が破損した場合は、過誤により発生した事象の為、製品保証の対象外となります。直ちに使用を中止してください。	ご使用上で取扱いの過誤により発生した故障は、保証対象となりません。
コントロールボタンに破損や異常はありませんか。	外部からの衝撃または落下によりにより、本体のコントロールボタンが破損した場合は、過誤により発生した事象の為、製品保証の対象外となります。直ちに使用を中止してください。	ご使用上で取扱いの過誤により発生した故障は、保証対象となりません。
本体の起動時の問題		
本体の電源を入れるには、電源コードを接続する必要があります。	上記を確認しても外部からの衝撃または何らかの要因によって本体が作動しない場合は、電源コードを交換してください。ただし、過誤により発生した事象の為、製品保証の対象外となります。	ご使用上で取扱いの過誤により発生した故障は、保証対象となりません。
本体の電源を入れることはできるが、本体に異常が発生する。	本体の操作中に急に吸引力が低下した、発煙した、異臭がする、異音がする、吸引力の調整ができない、15分間継続使用後に自動電源がオフにならない、などの異常な現象が発生した場合。	本体操作中に異常な現象が発生した場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または製造販売元にお問合せください。 本体に物理的損傷や痕跡等がない場合でも、保証の対象となります。

Nosiboo Pro の製造販売元は、本書のトラブルシューティングガイドおよび故障管理ガイドのセクションの内容に基づいて、お客様からの苦情を迅速に対応する義務があります。これらの処理は、製造販売元が、お客様からの保証書に記載された、不具合内容、日付、本体の製造・ロット番号を確認し、文書記録としてすべて保管する義務があります。

製品に関するお問合せ先

株式会社ジェイ・シー・ティ

〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園1丁目28番7号

TEL:082-962-1701 / FAX:082-850-3235

受付時間 / 平日9:00~17:00（土・日・祝日を除く）

ホームページ : <https://www.aidee.jp>

6.メンテナンスと保管

本体が完全に停止した後に、電源コードをコンセントおよび本体から取り外してください。本体から鼻水カップと吸引チューブを取り外してください。本体側の吸引チューブ差込口部の裏側にはあるフィルターにより、固体物やほこりなどの本体への侵入を防ぎます。吸引力が低下した場合は、フィルターを必ず確認してください。フィルターが汚れていた、または詰まっていた場合は、新しいものと交換してください。
(スペア部品は、「11.アクセサリー、スペアパーツ」のセクションにあります。)

参照：図1 – 各パーツの名称・組み立て方

乾いた布で本体を拭き、汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布をかたくしぶり、汚れをふき取ります。

本体は、高温多湿を避け、キャビネットなどの清潔な場所に保管してください。

複数のお子さまに使用される場合は、別々の鼻水カップを使用し、それぞれの鼻水カップ別に保管してください。

熱器具の近くには絶対に保管しないでください。

7.洗浄・消毒について

1.吸引チューブとノズルを取り外し、鼻水カップを分解します。

2.セパレーター、ノズル、および鼻水カップをぬるま湯と中性洗剤で洗浄し、乾燥させます。

3.必要に応じて、部品（ノズル、鼻水カップ、吸引チューブ）を消毒することができます。

ご使用される消毒液がベビー用品に安全に使用できることを必ずご確認ください。

*煮沸消毒、食器洗い機、電子レンジ、哺乳瓶滅菌機などの加熱機器での消毒・洗浄は、各部品が熱で変形、破損する恐れがある為できません。

参照：図4 – 鼻水カップの分解

4.乾いた柔らかい布で本体ハウジングを清掃します。この時、液体や化学薬品を使用しないでください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布をかたくしぶり、汚れをふき取ります。

5.必要に応じてやわらかい布で吸引チューブを拭きます。チューブを洗う必要はありませんが、

吸引チューブ内が汚れた場合のみチューブ内を洗浄ししっかり乾燥させてからご使用ください。



*付属の洗浄ブラシを使って
ノズル内部をよく洗います。

8.電磁干渉に関する重要な情報

一般的に家庭の無線ネットワーク機器、携帯電話、および無線電話などは、機器間で電磁干渉が発生することにより、医療機器の動作に影響を与える操作に有害な干渉を引き起こす可能性があり、本体に致命的な問題が生じる場合があります。

電磁干渉に関する安全規格は、医療機器の保護レベルと、想定される電磁放出の最大値で定義されており、電磁適合性を保証するために、Nosiboo Proはその安全規格に必要な要件を全て満たしています。

電動鼻水吸引器Nosiboo Proは、EN 60601-1-2 : 2007に準拠していますが、念のため、以下の手順で使用する必要があります

- * 携帯電話や無線電話などの電磁放射を発する機器の近くで本体を使用しないでください
本体が誤動作し、致命的な問題を引き起こす可能性があります。
- * 本体と電磁放射を発する他の機器とは、5 m以上は離してください。
5m以上離して使用できない場合は、事前に適切な動作確認してからご使用ください。

9.環境

本品は、電子製品です。電子製品は、有害廃棄物となるため、本品を家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。
本品を廃棄する場合、お住まいの自治体によって方法が異なりますので、各自治体の処分方法に従って廃棄してください。

ノズル・鼻水カップ・吸引チューブは環境に深刻なリスクを与えないため、家庭ごみとして廃棄できます。



10.製品仕様

販売名：デスクトップ型電動鼻水吸引器 NO-07

一般的な名称：電動式可搬型吸引器

医療機器クラス：管理医療機器

モーター性能：200-370 VA

最大吸引圧：- 8kPa±15%

排気流量：35 L/min ±15%

入力電源：AC100 V, 50-60 Hz

電気機械器具の外郭による保護等級：IP21

電撃に対する保護の形式：クラスII機器

電撃に対する保護の程度：BF形装着部

適用部位：本体のハウジングに緩みなきこと。

作動頻度：長時間の連続操作不可

操作可能時間：15分 自動電源OFF/ 約 50分間 操作不可

連続使用時間：15分以下

本体動作自動停止温度：95°C

本体表面の平均温度：1分間連続使用時、30-35°C

雑音量：55~62 dB

使用・保管環境温度：-10~40°C

使用・保管環境湿度：≤ 75%RH (露結なきこと)

本体（電気部品）の耐用年数：3年【自己認証による】

鼻水カップの耐用期間：約3ヶ月【自己認証による】

鼻腔へ挿入するノズル先端の直径：5.6 mm

鼻腔へ挿入するノズル端の長さ：32mm以下

本体重量：972 g

本体寸法：幅200 X 奥行175 X 高さ155 (mm)

化粧箱寸法：幅189 x 奥行189 x高さ190 mm

11.アクセサリー、スペアパーツ

部品購入をご希望の方は、製造販売元にお問合せください。

株式会社ジェイ・シー・ティ

〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園1丁目28番7号

TEL:082-962-1701 / FAX:082-850-3235

受付時間 / 平日9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

ホームページ : <https://www.aidee.jp>

写真



部品番号

AC-07-03

部品名

ノズル (グリーン)



AC-05-03

鼻水カップ



AC-03-03

吸引チューブ (グリーン)



AC-04-01

フィルター



NO-01-022-A6-0WEA2

電源コード



CO-01-03

鼻水カップ
ノズル (グリーン)
吸引チューブ (グリーン)



AC-06-03

吸引チューブ差込口 (グリーン)



NO-00-023-A1-0XX

洗浄ブラシ

保証書

取扱説明書、本体銘板などの注意に記載されている注意事項をご確認の上、正常な使用・目的のもとで、保証期間内に万一故障した場合は、無償対応いたします。保証期間内に故障して無償対応をご依頼される場合は、お客様のご氏名、ご住所、電話番号、理由をご明記の上、レシートなどのご購入記録を添えてご購入いただいたました販売店または製造販売元にお問合せください。保証期間内でも次の場合は、有償対応となります。

- 本書のご提示がない場合。
- 本書にお買い上げ年月日、お買い上げの販売名の記入がない場合。
- 不當な修理や改造、分解による故障、損傷。
- 誤ったご使用あるいはお取扱いによる故障、損傷。
- お買い上げ後の落下による故障、損傷。
- 地震、火災、雷、風水害その他天災地変などによる故障、損傷。
- 付属品の消耗による交換。

製品の保証は、日本国内においてのみ有効です。保証期間は、ご購入日から1年間有効です。
保証書は、再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

お客様ご記入欄

※無償対応・修理のご依頼の際は、
下記をご記入の上、製造販売元にご提示ください。

販売名：デスクトップ型電動吸引器 NO-07

製造番号（本体の底部ラベルに記載されています）：

お買い上げ日： 年 月 日

お買い上げ店：

故障の内容：

お客様情報：ご住所

電話

ご氏名

保障期間はお買い上げ日より1年間です。

製造販売元 記入欄

受領日： 年 月 日

修理部品名：

新製造番号：

返却日： 年 月 日

製造販売元の書名：

交換部品の保証期間は1年間です。

連絡先・製造販売元

株式会社ジェイ・シー・ティ
〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園1丁目28番7号
TEL:082-962-1701 / FAX:082-850-3235
受付時間 / 平日9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)
ホームページ : <https://www.aidee.jp>

この明示的保証は、消費者の默示的保証には影響しません。

Nosiboo Proは管理医療機器です。

適用法：指令2011/83 / EU §16 (e) 欧州議会および欧州委員会
オーストリア共和国：FAGG : §18 (1) 5、ハンガリー：45/2014. (II. 26.) 政府令29 (1) (e).
日本：医薬品医療機器等法

製造所 Attract Kft. Hungary, H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Tel: +36 72 551 642 (Mo-Fr: 8 am - 4 pm)

nosiboo^{*}pro
electric nasal aspirator

www.nosiboo.jp