


電動鼻水吸引器 ノジブープロ

^{*}
nosiboo[®]pro



electric nasal aspirator

クイックマニュアル

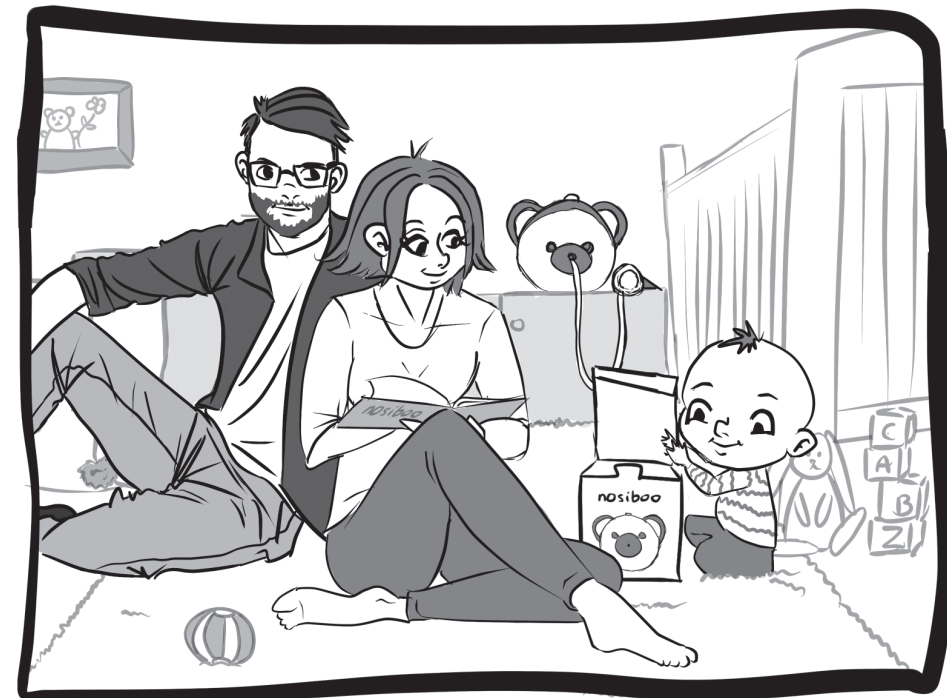

ご使用前に本書と取扱説明書をよくお読みください。 本書を大切に保管してください。

Supermum & Nosiboo

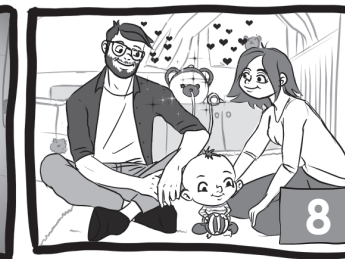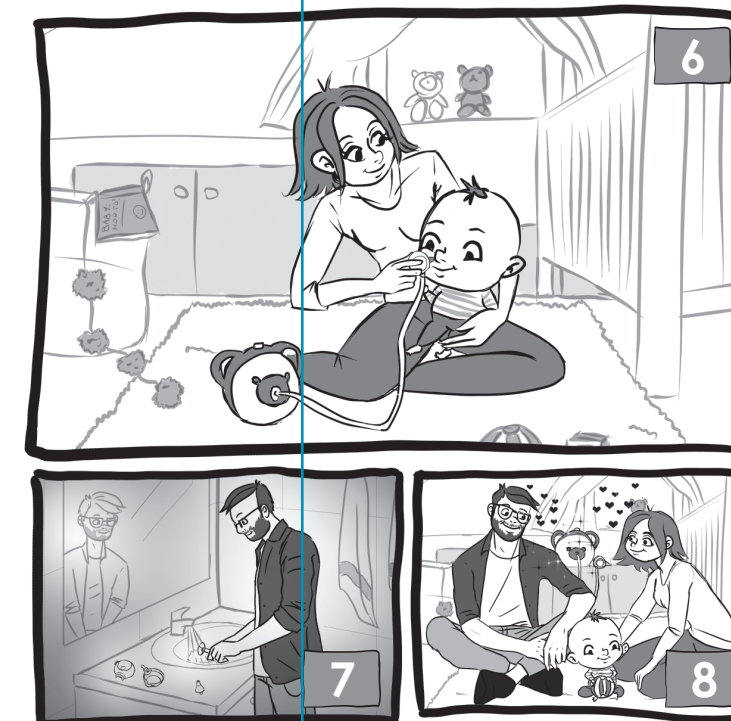

to be continued...

^{*}
nosiboo[®]
designed to care



アフターサービス
使い方、洗浄方法、およびトラブル
シューティングの詳細については、
取扱説明書をご確認ください。

日本: nosiboo.jp
aidee@jci-inc.jp
Tel : 082-962-1701
受付時間: 平日9: 00~17: 00
株式会社ジェイ・シー・ティ

内容物

クイックマニュアル



取扱説明書



添付文書



本体

吸引チューブ

ノズル
(スペア)

鼻水カップ+
ノズル

洗浄ブラシ

電源コード

フィルター

吸引チューブ差込口

内容物に不足・不備等ございましたら、ご購入いただいた販売店または、製造販売元にお問合せください。


お使いになる前に

1. 鼻水カップを組立てる。




洗浄*して乾燥させた鼻水カップをご使用ください。
*洗浄方法については、「洗浄方法」のセクションをご確認ください。

本製品は、お子さまの鼻水吸引用に設計されていますので、他の目的には使用しないでください。

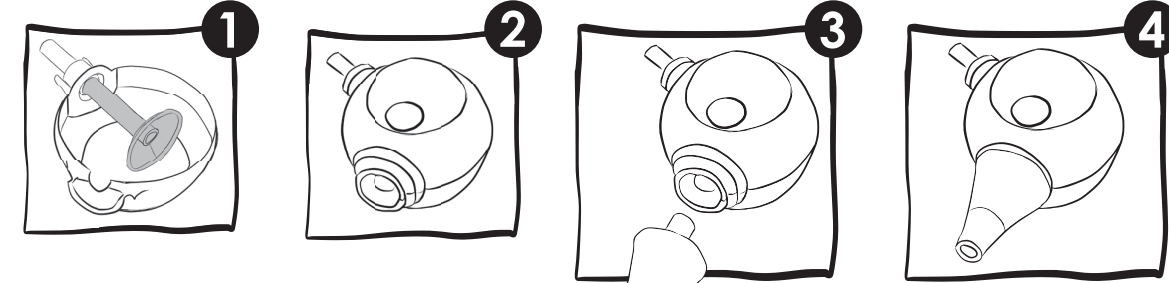

2. 本体に部品を装着する。

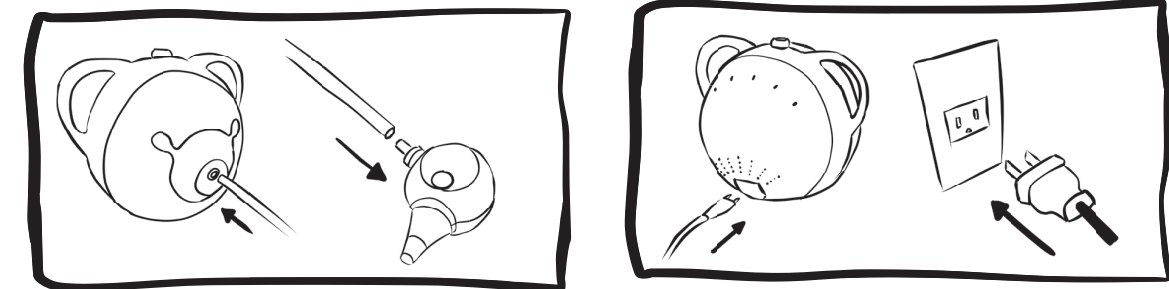

a) 吸引チューブを鼻水カップと本体の吸引チューブ差込口に装着してください。

b) 電源コードを本体とコンセントに接続してください。

準備完了です。

使用方法と設定



洗浄方法について

